

# SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasenabstrich)

REF ACO-1001

Gebrauchsanweisung  
Test zur Eigenanwendung  
Deutsch




Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Nasenabstrichproben. Für Selbsttests in der In-vitro-Diagnostik.

## VERFAHREN

Waschen Sie vor der Testdurchführung gemäß den örtlichen Vorschriften über Hygienestandardverfahren sorgfältig die Hände.



Entfernen Sie die Abdeckung des Röhrchens mit Extraktionspuffer und stellen Sie es in den Röhrchenhalter.

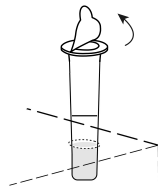


## Entnahme von Nasenabstrichproben


1. Nehmen Sie den sterilen Tupfer aus der Verpackung.

### Hinweis:

Berühren Sie nicht den „Baumwoll“-Ende des Tupfers.

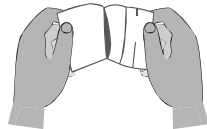

2. Führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein, bis Sie einen leichten Widerstand spüren (ca. 2 cm tief). Drehen Sie den Tupfer langsam und reiben ihn 5 bis 10-mal entlang der Innenseite des Nasenlochs gegen die Nasenwand.

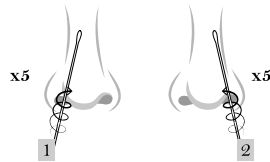

**Hinweis:** Dies kann sich unangenehm anfühlen. Wenn Sie einen starken Widerstand oder Schmerzen verspüren, führen Sie den Tupfer nicht tiefer ein.

Wenn die Nasenschleimhaut beschädigt ist oder blutet, wird eine Entnahme von Nasenabstrichproben nicht empfohlen.

Wenn Sie Nasenabstriche von anderen Personen nehmen, tragen Sie bitte einen Mundschutz. Bei Kindern muss der Tupfer nicht so weit in das Nasenloch eingeführt werden. Bei sehr kleinen Kindern benötigen Sie möglicherweise eine weitere Person, um den Kopf des Kindes während der Probenentnahme ruhig zu halten.



3. Entfernen Sie den Tupfer vorsichtig.

4. Wiederholen Sie Schritt 2 mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.

5. Ziehen Sie den Tupfer heraus.

## Probenvorbereitung

1. Führen Sie den Tupfer in das Extraktionsröhrchen ein und achten dabei darauf, dass er den Boden des Röhrchens berührt. Drehen Sie den Tupfer, um die Probe gut mit der Pufferlösung zu vermischen. Drücken Sie den Tupfer gegen das Röhrchen und drehen Sie ihn für **10-15 Sekunden**.

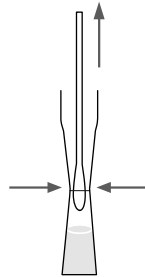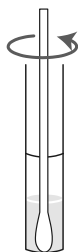

2. Drücken Sie den Tupfer beim Entfernen gegen die Innenseite des Extraktionsröhrchens. Geben Sie den Tupfer in einen Plastikbeutel.

3. Schließen Sie den Deckel oder setzen Sie die Kappe auf das Röhrchen.


## Testdurchführung

1. Nehmen Sie die Testkassette aus der versiegelten Folienverpackung, und führen Sie den Test innerhalb einer Stunde durch. Die verlässlichsten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Test sofort nach Öffnen der Folienverpackung durchgeführt wird.


Legen Sie die Testkassette auf eine ebene Fläche.

2. Drehen Sie das Extraktionsröhrchen um, und geben Sie **3 Tropfen der entnommenen Probe** in das **Probenfeld(S)** der Testkassette. Starten Sie dann die Stoppuhr. Bewegen Sie die Testkassette während der Testentwicklung nicht.

3. **Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab.** Lesen Sie das Ergebnis nicht nach mehr als 20 Minuten ab.

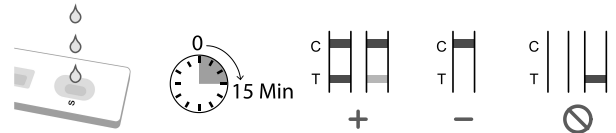

**Hinweis:** Geben Sie nach dem Test alle Komponenten in einen Plastikbeutel (z. B. einen Biosicherheitsbeutel) und verschließen Sie diesen dicht. Entsorgen Sie diesen anschließend gemäß den örtlichen Vorschriften.

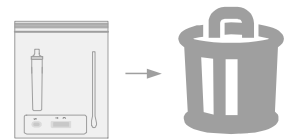

Waschen Sie nach Entsorgung des Tests gründlich Ihre Hände.

## INTERPRETATION DER TESTERGEBNISSE

Bitte teilen Sie Ihre Testergebnisse Ihrem Arzt mit und halten Sie die örtlichen COVID-Richtlinien/-Anforderungen ein.

**POSITIV:\* Zwei farbige Linien sind sichtbar.** Es sollte eine farbige Linie im Kontrolllinienbereich (C) und eine weitere farbige Linie im Testlinienbereich (T) zu sehen sein.

\*HINWEIS: Die Farbintensität der Testlinie (T) kann in Abhängigkeit von der Konzentration an SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe variieren. Daher muss jegliche Färbung der Testlinie (T) als positiv interpretiert werden.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Sie an COVID-19 erkrankt sind. Um dies wiederzuspiegeln, sollten die positiven Proben allerdings bestätigt werden. Begeben Sie sich gemäß den örtlichen Richtlinien unverzüglich in Selbstisolation und wenden Sie sich gemäß den Anweisungen Ihrer örtlichen Behörden an Ihren Hausarzt/Arzt oder an das örtliche Gesundheitsamt. Ihr Testergebnis wird durch einen PCR-Bestätigungstest überprüft und es werden Ihnen die nächsten Schritte erläutert.



**NEGATIV: Eine farbige Linie ist im Kontrollbereich (C) sichtbar.** In dem Testlinienbereich (T) ist keine farbige Linie zu sehen.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie an COVID-19 erkrankt sind. Es ist jedoch möglich, dass dieser Test bei einigen Menschen mit COVID-19 ein negatives Ergebnis anzeigt (ein falsch-negatives Ergebnis). Das bedeutet, dass Sie möglicherweise COVID-19 haben, obwohl der Test negativ ist.

Wenn bei Ihnen Symptome wie Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns auftreten, wenden Sie sich gemäß den Bestimmungen Ihrer örtlichen Behörde an die nächste medizinische Einrichtung. Außerdem kann der Test mit einem neuen Testkit wiederholt werden. Da die Antigene des Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion präzise nachgewiesen werden können, wiederholen Sie den Test im Falle eines Verdachts nach 1-2 Tagen.

Selbst bei einem negativen Testergebnis müssen die Regeln für Abstand und Hygiene eingehalten werden und Maßnahmen zur Migration/Reisen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. müssen den örtlichen COVID-Richtlinien/-Anforderungen entsprechen.



**UNGÜLTIG: Keine Kontrolllinie sichtbar.** In den meisten Fällen liegt dies an einem unzureichenden Probenauftrag oder einem nicht genauen Befolgen der Testanleitung. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test oder kontaktieren Sie ein COVID-19-Testzentrum.



